立人醫事檢驗所公告

LZ-QP-0901-04

主旨	eGFR 計算公式由 MDRD 改為 CKD-EPI。						
公告部門	生化			公告日期	114 年	7月	15 日
執行日期	114 年	7月	21 日	公告編碼	114071502		

內容:

依照台灣腎臟醫學會建議,經與健保署達成共識, eGFR 計算公式將從 MDRD 改為 CKD-EPI,新公式的準確性更高,MDRD 常低估 eGFR,可能讓病人看起來腎功能較差。此外,CKD-EPI 則能反映更真實情況,符合國際標準 (KDIGO 推薦),並有助於臨床與研究數據的一致性。

將於 2025/07/21 起所發出報告統一使用新計算公式呈現。

2021 CKD-EPI 計算公式如下,請參考。

腎絲球過濾率值 2021 CKD-EPI (Creatinine)

慢性腎臟病的五個階段是以「eGFR」(腎絲球濾過率值)來判斷您的腎臟功能,而eGFR又必須綜合考量您的年齡、性別以及「CR」(血清肌酸酐)。您知道自己的「CR」(血清肌酸酐)多少嗎?知道的話就可以計算你的腎臟功能了:計算公式:

142 X min(Scr/K,1)^α X max(Scr/K,1)^{-1,200} X 0.9938^年 X 1.012 [if female]

Scr =血清肌酸酐濃度(mg/dL)

K = 女性: 0.7; 男性: 0.9

α=女性: -0.241; 男性: -0.302

min =計算出來的值跟1比較後,選擇比較小的max =計算出來的值跟1比較後,選擇比較大的

